

Солнышко .Облучатель ультрафиолетовый кварцевый ОУФК-01 – 840 грн.



Харків, Україна

Ультрафиолетовый облучатель "Солнышко" предназначается для проведения процедуры облучения - как местного так и локального при лечении некоторых заболеваний уха, горла, носа, а также фурункулеза, ОРЗ, различных кожных заболеваний, болезней суставов, трофических язв и др.

Применяться ультрафиолетовый облучатель "Солнышко" может не только в медицинских учреждениях, но и в санаториях, профилакториях или в квартире.

Кварцевая лампа предназначена для:

кварцевание помещений — обеззараживание воздуха и поверхностей помещений с целью предотвращения заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.

кварцевание организма человека — облучение УФ лучами при лечении воспаления ЛОР-органов (ухо, горло, нос), а также кожных и ряда других заболеваний.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Напряжение питания 220В 50 Гц

Диапазон излучения:

для локальных процедур 220-240 нм

для общих облучений 280-400 нм

Потребляемая мощность не более 300 ВА

Габаритные размеры 230x145x155 мм

Масса комплекта 1, 5 кг

Класс электробезопасности 2 тип ВФ

Непрерывная работа 30 мин., перерыв не менее 15 мин.

Комплект поставки кварцевой лампы:

Ультрафиолетовый кварцевый облучатель ОУФК-01 "Солнышко" - 1 шт.

Тубус 5 мм для внутрисполостных облучений - 2 шт.

Тубус 15 мм для внутрисполостных облучений - 2 шт.

Очки защитные - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Ультрафиолетовое облучение (местное или общее) применяют для компенсации ультрафиолетовой недостаточности, повышения сопротивляемости к различным инфекциям (например, гриппу), как болеутоляющее и противовоспалительное средство при заболеваниях суставов, периферической нервной (невриты, невралгии, радикулиты), мышечной (миозиты), дыхательной (бронхиты, плевриты) систем, при кожных (грибок, экзема, псориаз, дерматит), гинекологических заболеваниях, нарушениях обмена веществ, некоторых формах туберкулёза. В педиатрии этот вид светолечения используют для профилактики рахита, острых респираторных заболеваний, повышения защитных сил организма. В межприступном периоде ревматизма, а в сочетании с противоревматическими и медикаментозными средствами - и в острой фазе заболевания.

Кварцевая (ультрафиолетовая, бактерицидная) лампа предназначена для оздоровления организма в зимние месяцы. Зимой, когда наш организм почти не получает солнечных лучей, очень хорошее действие оказывает облучение кварцем. Конечно, искусственное кварцевое солнце никогда не заменит настоящего, но оно дает возможность миллионам людей укреплять в зимние месяцы свой организм.

Облучение кварцевой лампой хорошо действует на обмен веществ, на кровообращение, усиливает сопротивляемость организма различным заболеваниям инфекциям. При помощи сеансов кварца можно бороться с некоторыми незаразными кожными заболеваниями. Но в этих случаях особенно необходимо, прежде чем пользоваться кварцем, получить консультацию врача. Продолжительность облучения нужно увеличивать постепенно, начиная с 1 минуты и доходя до 5 минут. Особенно старательно надо предохранять от света кварцевой лампы глаза. Не обязательно надевать солнечные очки, которые оставляют на коже некрасивые полосы. Ватный тампон или небольшой лист бумаги прикроют веки от чрезмерного света. Если вы этого не сделаете, то испортите глаза и, кроме того, образуются морщины, так как кожа вокруг глаз особенно тонкая и лишена жировой прослойки. Существуют люди, организм которых не выносит горного солнца, ни искусственного, ни настоящего. Если через некоторое время после окончания сеанса у вас начинается сильная головная боль, нервное раздражение, головокружение, лучше раз и навсегда отказаться от кварцевой лампы даже тогда, когда вам очень хочется придать своей белой коже золотистый оттенок.

Перед облучением кварцем намажьте кожу маслом или кремом, но не очень обильно. Масло или крем надо равномерно растереть. При жирной коже, если сальные железы работают чересчур интенсивно, можно добиться хороших результатов, проводя процедуры под наблюдение врача. Прыщи, которыми часто страдают молодые люди в период полового созревания, хорошо лечатся кварцевой лампой.

Если у вас очень чувствительная и сухая кожа, которая легко покрывается трещинами, если имеются расширенные кровеносные сосуды, необходимо вообще отказаться от кварцевой лампы, в этом случае рекомендуется применение аппарата дарсонваля.

Кто страдает от веснушек, должен в зимние месяцы регулярно, два-три раза в неделю, по несколько минут принимать сеансы кварца. Кожа приобретет ровную окраску, и коричневые пятнышки не будут бросаться в глаза, когда первые горячие лучи возвестят о начале весны. Кварцевая лампа помогает при различных заболеваниях волос, а также при их выпадении. Но хороших результатов можно добиться только в том случае, если точно выполнять предписания врача. Каждый человек реагирует на лечение по-своему, поэтому не существует никаких общих правил.

Производитель: ГЗАС им. А. С. Попова (Россия)

Price: **840 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Артемова Виктория

063-986-63-76